

Gebrauchsanweisung Dürener Faltstock

Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus den Rurtalwerkstätten Düren entschieden haben. Unser Unternehmen hat am 01.01.2016 die Produktion des Dürener Blindenstocks übernommen. Wir werden Ihnen weiterhin ein innovatives und hochwertiges Produkt zur Verfügung stellen. Diese Gebrauchsanweisung gibt Ihnen Tipps zur Anwendung Ihres Blindenstocks. Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung auf, damit Sie zukünftig bei Fragen darauf zurückgreifen können.

Der Dürener Blindenstock erfüllt zwei Aufgaben. Zum einen unterstützt er Sie zuverlässig als offiziell anerkanntes Hilfsmittel unter Anwendung diverser Nutzungstechniken bei der Orientierung im Nahbereich. Zum anderen schließt er Sie zusätzlich laut Straßenverkehrsordnung aus dem Vertrauensgrundsatz aus (§ 2 StVO). Er entspricht somit den Anforderungen an das gesetzlich vorgeschriebene Verkehrsschutzzeichen.

Wichtig: Der Gebrauch eines Blindenstocks muss erlernt werden. Nur so kann die sichere Teilnahme am Straßenverkehr gewährleistet werden. Deshalb sollte bei der Erstanschaffung zwingend ein Orientierungs – und Mobilitätstrainer für blinde und sehbehinderte Menschen konsultiert werden. Die Teilnahme an einer entsprechenden Schulung ist gegebenenfalls erforderlich. Finanzielle Zuschüsse für die Blindenstöcke und die Teilnahme an einem Training sind möglich.

Dürener Blindenstöcke werden in den vielfältigsten Ausführungen angeboten. Insbesondere gibt es große Unterschiede beim Schaft und der Spitze. Zur besseren Aufbewahrung lassen sich die Stöcke zusammenklappen (vierteilige Faltstöcke) oder zusammenschieben (dreiteilige Teleskopstöcke).

Konformitätserklärung

Wir erklären als Hersteller der Dürener Blindenstöcke, dass das Ihnen vorliegende Produkt die Anforderungen der Verordnung 2017/745/EU über Medizinprodukte erfüllt und das CE-Zeichen nach dieser Verordnung trägt.



Lieferumfang

- 1 Umverpackung
- 1 Dürener Blindenstock
- 1 Gebrauchsanweisung in Schwarzschrift
- 1 USB-Stick mit der Audio-Datei

Zweckbestimmung

Die Dürener Blindenstöcke dienen als Orientierungs-, Wahrnehmungs- und Fortbewegungshilfe für Menschen mit hochgradiger Sehbehinderung oder Blindheit.

Indikationen

- Erkrankungen des Auges oder Störungen des Sehvermögens, die mit einer hochgradigen Sehbehinderung oder Blindheit verbunden sind.

Kontraindikationen

- Nicht anzuwenden bei Störungen des Gleichgewichtsorgans.

Pflege- und Nutzungshinweise für den Benutzer

Damit die Stockmodelle möglichst lange genutzt werden können, sind Hinweise zu beachten:

- Verschmutzungen können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.
- Die Gummiringe der Kupplungsstücke der faltbaren Modelle sind bei Bedarf mit Vaseline zu schmieren, um das Falten und Zusammenstecken ohne Kraftaufwand sicherzustellen. Bitte kein Öl verwenden!
- Das Zusammenlegen sollte stets von unten aus erfolgen, um die Haltbarkeit des Gummizuges im Inneren des Stocks zu gewährleisten.
- Der zusammengelegte Stock kann mit Hilfe des mittig am oberen Stockteil angebrachten Gummibandes fixiert werden. Wickeln Sie das Band einmal um den Stock und führen Sie dann die Metallöse über den Bolzen.
- Die Tastspitzen sind aufgesteckt. Sie können bei Verschleiß ausgewechselt werden. Beim Austausch die alte Tastspitze mit einer Drehbewegung abziehen. Sollte es einmal nicht so einfach gehen, die Kunststoffhülse unter heißem Wasser erwärmen, dann lässt sie sich besser abziehen.
- Sollten Sie Probleme oder Fragen zum Umgang mit dem Produkt haben wenden Sie sich an uns oder Ihren Fachhändler (bzw. Ihren Mobilitätstrainer)

Der bewährte vierteilige faltstock

Die Eigenschaften dieses Blindenstocks in Kurzform:

- Optimale Sicherheit dank weißer Beschichtung mit zusätzlichen Reflektorzonen und elektrisch nichtleitendem, pflegeleichtem Kunststoff
- Bester Nutzungskomfort durch den auf einer Seite abgeflachten Griff aus hautfreundlichem Naturkork
- Handschlaufe am Griff
- Hohe Stabilität
- Solide Verarbeitung verschleißfester Einzelteile
- Problemloses Auswechseln der Verschleißteile
- Verschiedene Standardformate und jedes gewünschte Sondermaß
- Verschiedene Kugelspitzen zur Auswahl
- Verschiedene Sonderformen auf Anfrage

Nur faltstock:

- Leicht faltbar auf eine Länge von 30 bis 40 cm

Technische Daten:

- Hochfestes und biegeelastisches Aluminium-Rohr, 13 mm Durchmesser in verschiedenen Längen, entsprechend der Schrittlänge des Anwenders, verfügbar
- Spielfreie Steckverbindungen, selbstzentrierend
- Weiße Kunststoffbeschichtung, elektrisch isolierend bis 20 kV
- Hochwertige Reflexfolien
- Griffiger Naturkorkgriff antiallergisch, kälteisolierend und resistent gegen Schweißeinwirkung
- Kugelspitzen aus Duroplast, verschleißarm

Sicherheitshinweis:

Die Dürener Blindenstöcke sind mit einer Gummischlaufe am Griff ausgestattet, die ausschließlich zum Transport des Stockes dient. Bitte diese Schlaufe nie bei Benutzung des Stockes über das Handgelenk ziehen! Sie könnten ansonsten eventuell bei Hindernissen nicht nur mit dem Stock, sondern auch mit der Hand hängen bleiben und sich verletzen.

Entsorgung:

Entsorgen Sie defekte oder verschlissene Blindentaststöcke, Zubehör und Verpackung nicht im Hausmüll, sondern entsprechend den nationalen und örtlichen Vorschriften für Umweltschutz und Rohstoffrückgewinnung. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Entsorgungsunternehmen.

Meldepflichtige Vorkommnisse:

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegende Vorkommnisse sind uns oder der zuständigen Behörde unverzüglich zu melden.

Garantieerklärung: Auf die einwandfreie Funktion der Dürener Stöcke gewähren wir 2 Jahre Garantie, außer auf Verschleißteile oder bei unsachgemäßer Benutzung. Reparaturen werden gegen Erstattung der Selbstkosten ausgeführt.



Hersteller gemäß MPG:

Rurtalwerkstätten Lebenshilfe Düren gemeinnützige GmbH
Veldener Straße 7-9
52349 Düren



Rev03_21