

Allgemeine Produkthinweise

Der Stockschirm TWIN ist eine Kombination aus Schirm und Gehstock. Ein kleiner Kugelknopf arretiert den Gehstock im Schirmstock. Ein leichter Knopfdruck des Kugelknopfes aber löst blitzschnell die Trennung aus, wenn der Schirm und der Gehstock separat benötigt werden.

Anwendung

Wenn der Schirm und der Gehstock separat benötigt werden, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Öffnen Sie den Schirm, so wie Sie es gewohnt sind, mit dem Schieber nach oben bis zum Anschlag. Der Schirm ist mit einer Semiautomatik ausgestattet, er arretiert von selbst.
- Jetzt wird am unteren Ende vom Griff ein kleiner Kugelknopf sichtbar. Mit einer Hand den Schirmstock festhalten bei gleichzeitigem Herunterdrücken des Kugelknopfes den Griff anfassen und den Gehstock herausziehen. Den Schirm geöffnet oder geschlossen beiseitelegen. Beide, der Schirm und der Gehstock, können jetzt einzeln eingesetzt werden. Durch diese einzigartige Kombinationsmöglichkeit erübrigt sich die Anschaffung eines weiteren Gehstocks.
- Soll der Stock wieder mit dem Schirm verbunden werden, genügt ein zügiges Einschieben, dabei braucht der Kugelknopf nicht extra heruntergedrückt werden!
- Wird beim Anschlag das Loch im Schirmstock nicht sofort erreicht, den Stock ein wenig drehen bis der Knopf automatisch einspringt.

Stellen Sie fest ob der Gehstock für Sie die richtige Höhe hat. Durch die Druckknopfverstellung können Sie die passende Höhe einstellen:

- Entriegeln Sie die Höhenverstellung, indem Sie den Druckknopf eindrücken.
- Passen Sie die Länge des Gehstocks Ihrer Körpergröße an und verriegeln Sie die Höhenverstellung wieder, indem Sie die Rohre so ausrichten, dass zwei Verriegelungslöcher übereinander liegen. Der Druckknopf muss hörbar einrasten.

- Der Gehstock ist mit einem Gummistopfen und der Schirm mit einer Gummikapsel gegen Abrutschen auf glatten Untergründen ausgestattet. In der Wohnung kann auf den Schirm selbstverständlich verzichtet werden.
- Alle Stockschirme TWIN-Modelle sind mit einem formschönen Fritzgriff mit Softtouch-Oberfläche ausgestattet. Diese Softtouch-Oberfläche zeichnet sich durch eine besonders griffige, samtige Oberfläche aus.
- Die Schirme sind mit einer besonderen Fiberglas-Schienenkonstruktion ausgestattet. Wird der Schirm z. B. von einer Windböe erfasst und das Schirmdach klappt über, ermöglicht die besonders flexible Schienenkonstruktion ein Zurückklappen des Schirmdaches, ohne dass die Streben verbiegen oder der Schirm beschädigt wird.

Ein Tipp:

- Nach dem Regen den Schirm immer aufgespannt (nicht in der Sonne) trocknen lassen!
- Sind die Gummipuffer von Stock und Schirm einmal abgelaufen, können Sie diese in Ihrem Fachgeschäft als Ersatzteile nachkaufen.

Lagerung und Pflege

Lagern Sie den Stockschirm niemals in der Nähe von Wärmequellen wie Öfen, Heizungen oder im KFZ auf der Ablage! Starke Sonne oder Hitze können das Material schädigen!
Warnung! Griffe und Gummikapseln niemals mit öligen Substanzen reinigen! Rutschgefahr! Reinigen Sie bei Verschmutzungen gegebenenfalls mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Lappen. Verwenden Sie keine Lösungsmittelhaltige Reiniger, da diese das Material beschädigen können!

Gewährleistung und Haftung

Sie haben ein hochwertiges Ossenberg-Produkt erworben. Sollte trotz höchster Qualitätsstandards ein berechtigter Sachmangel auftreten, steht Ossenberg das Recht zu, im Rahmen einer 12-monatigen Gewährleistung, nach eigener Wahl die mangelhafte Sache nachzubessern oder durch eine mangelfreie Nachlieferung zu ersetzen. Für Schäden, die durch die Veränderungen an unseren Produkten entstanden sind, können wir keine Haftung übernehmen. Nicht von der Gewährleistung erfasst sind Mängel, die auf Verschleiß oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind. Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Es dürfen nur Originalersatzteile und Zubehör verwendet werden! Für Ersatzteile, Zubehör und Reparaturen wenden Sie sich bitte an den Fachhandel.

Entsorgung

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler nach den regionalen Entsorgungsvorschriften.

Technische Daten

Artikel-Nr.	Ausführung	Design
3030	Große Ausführung	Karo braun
3033	Große Ausführung	Karo rot / blau
3034	Große Ausführung	schwarz
3036	Große Ausführung	Karo blau / grün
3038	Große Ausführung	Paisley bordeaux
3039	Große Ausführung	Design Hahnentritt
3060	Große Ausführung	Karo schwarz / blau / rot / weiß
3130	Kleine Ausführung	Karo braun
3133	Kleine Ausführung	Karo rot / blau
3134	Kleine Ausführung	schwarz
3136	Kleine Ausführung	Karo blau / grün
3138	Kleine Ausführung	Paisley bordeaux
3139	Kleine Ausführung	Design Hahnentritt
3160	Kleine Ausführung	Karo schwarz / blau / rot / weiß

Schirm	Große Ausführung	Kleine Ausführung
Spezial-Leichtmetall-Schirmrohr	Ø 16 mm	Ø 16 mm
Gewicht	605 g	568 g
Schirm-Ø	ca. 105 cm	ca. 105 cm
Höhenverstellbar (Schirm inkl. Gehstock)	87 cm - 95 cm	80 cm - 83 cm

Gehstock	Große Ausführung	Kleine Ausführung
Rohr	Ø 14 mm	Ø 14 mm
Gewicht	242 g	215 g
Höhenverstellbar	5-fach durch Druckknopf von 85 cm – 93 cm	3-fach durch Druckknopf von 78,5 cm – 81 cm
Länge Fritzgriff	12,5 cm	12,5 cm
Max. belastbar bis	100 kg Körpergewicht	100 kg Körpergewicht

Zubehör	
Artikel-Nr. 969P	Gummikapsel für Schirm, Innen-Ø 16 mm
Artikel-Nr. 3086P	Gummistopfen für Gehstock, Innen-Ø 10 mm

Weiteres Zubehör finden Sie unter www.ossenberg.com